



# Montage- und Bedienungsanleitung für Pflegebett „S“ + „Si“

## **Inhaltsverzeichnis:**

### **Kurzanleitung**

- |                    |             |
|--------------------|-------------|
| 1. Pflegebett „S“  | Seite 02-03 |
| 2. Pflegebett „Si“ | Seite 04-07 |

Kurzanleitung  
Pflegebett „S“  
100/120/140x200cm



1. Das Kopfteil hat keine Bohrungen und ist größer als das Fußteil!



2. Das Fußteil mit den beiden Bettseiten verbinden.



3. Zugentlastung bitte am Längsseitengitter anbringen. (Bitte darauf achten, dass wenn der Unterrahmen in der höchsten Position ist, das Kabel zwischen Quadromat und Zugentlastung locker ist.

# Kurzanleitung Pflegebett „S“ 100/120/140x200cm



4. Das Fußteil mit den Bettseiten verbinden.  
(Bohrungen im Fußelement).



5. Im Kopf- und Fußbereich die Inbusschrauben (6x90) im unteren Bereich befestigen.  
6. Das absenkbare Seitengitter im oberen Bereich der Laufleisten einführen und das Längseitengitter in die unterste Position bringen.



7. Die Schrauben an den Eckpfosten  
(8 Schrauben) festdrehen.

Kurzanleitung  
Pflegebett „S“  
100/120/140x200cm



1. Das Kopfteil hat keine Bohrungen und ist größer als das Fußteil!



2. Das Fußteil mit den beiden Bettseiten verbinden.



3. Zugentlastung bitte am Längsseitengitter anbringen. (Bitte darauf achten, dass wenn der Unterrahmen in der höchsten Position ist, das Kabel zwischen Quadromat und Zugentlastung locker ist.

Kurzanleitung  
Pflegebett „S“  
100/120/140x200cm



4. Den vormontierten Unterrahmen zwischen den beiden Bettseiten schieben und auf den Auflagen positionieren.



5. Das Fußteil mit den Bettseiten verbinden. (Bohrungen im Fußelement).



6. Die Schrauben an den Eckpfosten (8 Schrauben) festdrehen.

Kurzanleitung  
Pflegebett „S“  
100/120/140x200cm



7. In die vorgebohrten Löcher bitte die Fahrwerkfeststeller einsetzen.



8. Die Stange des Fahrwerkfeststellers wie folgt durchschieben.



9. Den Sechskant-Aufsatz aufstecken.

Kurzanleitung  
Pflegebett „S“  
100/120/140x200cm



10. Bitte schieben Sie die Stange des Fahrwerkfeststellers durch.



11. Den Sechskant-Aufsatz festziehen.



12.  
Die Kreuzschlitz-  
schrauben in die  
Eisenanschlagsleiste  
schrauben.  
(12 Schrauben)

Ihr Fachhändler:



[www.savi.de](http://www.savi.de)

[info@savi.de](mailto:info@savi.de)

SAVI GmbH  
Reha Solutions  
Lise-Meitner-Str. 10  
D-48691 Vreden

Postfach 1123  
D-48684 Vreden  
Fon: +49 (0) 25 64 - 93 09-70  
Fax: +49 (0) 25 64 - 93 09-60